


UNIX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАССАЖНЫЙ СТОЛ UNIX STANDARD 3 SECTION

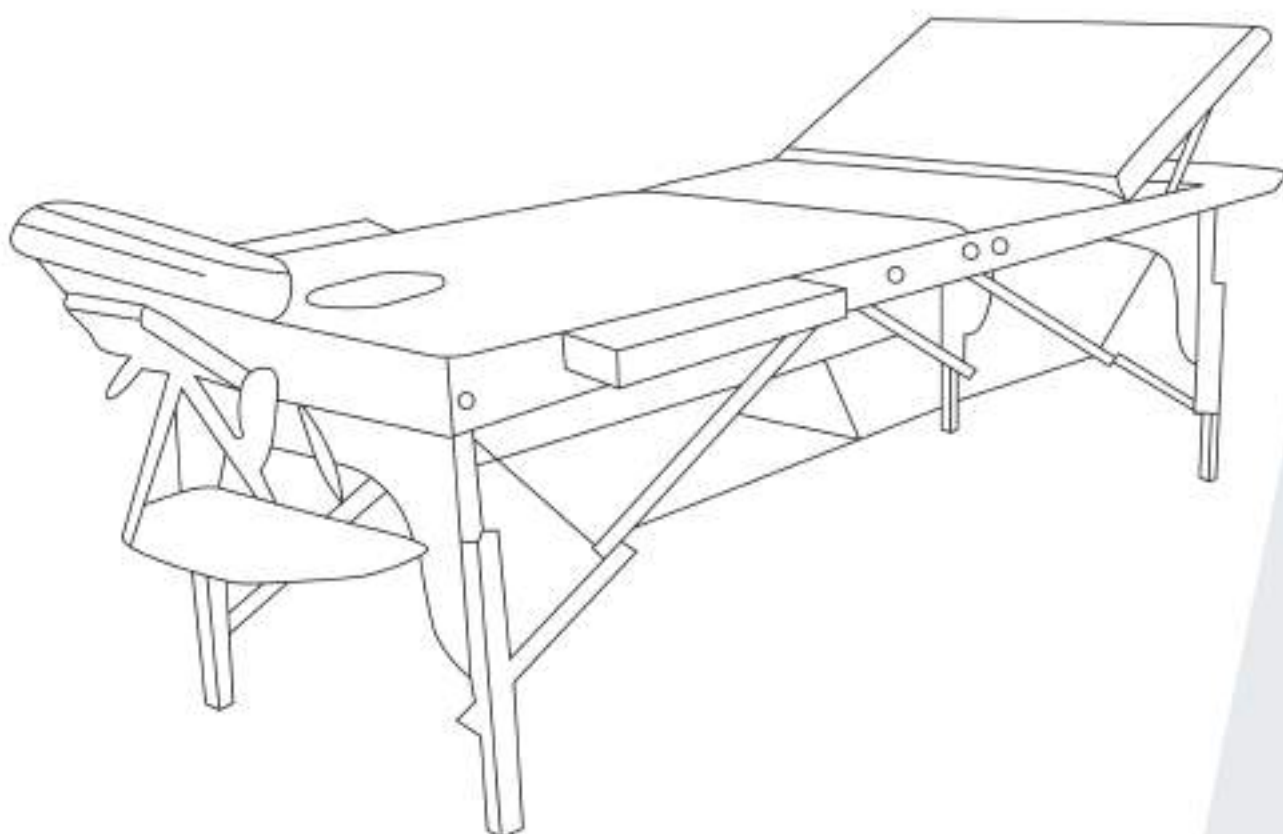

ВАЖНО

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

UNIX

Рады приветствовать вас!

Спасибо, что выбрали продукцию нашего бренда. В целях вашей безопасности мы просим вас внимательно изучить инструкцию перед использованием. Если инструкция будет утеряна, вы всегда можете её скачать на официальном сайте unixfit.ru

UNIX заботится о своих покупателях, поэтому мы всегда готовы ответить вам на все возникающие вопросы по эксплуатации товара. Для этого обратитесь к своему продавцу или дилеру.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам лучшие и самые современные решения на рынке. Тренажёры и товары для активного отдыха **UNIX** уже более 10 лет пользуются популярностью. Полный ассортимент вы можете изучить на официальном сайте. Для этого наведите камеру на QR-код ниже.



UNIXFIT.RU



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Периодически проводите техническое обслуживание изделия. Убедитесь в надежности всех винтов, целостности троса и отсутствии трещин в деревянных деталях.
- Не перегружайте стол сверх рекомендованного предела веса – 250 кг вместе с силой давления. Это может привести к серьезным травмам пользователя.
- Не используйте для очистки поверхностей чистящие средства на спиртовой основе. Это может привести к повреждению материалов. Используйте теплую мыльную воду, после чего вытирайте сухой тряпкой.
- При использовании стола следите за тем, чтобы все четыре ножки стояли на поверхности пола и находились на одном уровне.

УСТАНОВКА

Положите стол на бок, откройте застежки, частично раскройте стол и снимите с него дополнительные аксессуары (Рисунок 1).



Рисунок 1



Рисунок 2

Стоя за столом, возьмитесь за обе ручки и плавным движением полностью раскройте стол. Ножки при этом должны собраться автоматически (Рисунок 2).

Поднимите середину стола и переверните его в вертикальное положение. Нажмите на середину стола, чтобы убедиться, что стол стоит ровно. Если стол прогибается посередине, проверьте и выпрямите трос.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

В комплекте со столом мы предоставляем дополнительные аксессуары. Внимательно прочитайте нижеизложенную инструкцию перед использованием.

Подголовник:

Подголовник состоит из основания подголовника в виде полумесяца и подушки для лица. Он обеспечивает клиенту удобную поддержку головы и лица. Вы можете выбрать другой вариант основания подголовника. Регулируемый подголовник легко регулировать. Чтобы поменять угол и высоту основания, поверните ручку у крепления подголовника (Рисунок 3).



Рисунок 3

Регулируемая полка для рук:

Регулируемая полка для рук - хорошее приспособление для поддержки рук клиента в передней части стола. Повесьте полку на две перекладины подголовника и поднимите ремешок вверх или вниз для выбора оптимального положения (Рисунок 4).



Рисунок 5

Лямка для рук:

Это альтернативный аксессуар для поддержки рук, выполняющий те же функции, что и полка для рук (Рисунок 5).

Боковые подлокотники:

Съемные боковые подлокотники с мягкой обивкой увеличивают ширину стола. Они устанавливаются в отверстия для аксессуаров в боковых стенках стола. Это обеспечивает удобную опору для рук, особенно для клиентов с большим весом.

Регулировка высоты:

Правильная высота стола определяется ростом терапевта, его методикой и техникой. Вы можете отрегулировать высоту, сняв ручки регулировки на каждой ножке. После регулировки высоты установите ручки на место.

Ограничение веса:

Расположение клиента в центре стола поможет равномерно распределить вес и обеспечить устойчивость изделия. Посоветуйте клиенту сначала аккуратно сесть на середину стола (не на край), а затем сесть как можно ближе к центру по ширине (от края). Рабочий вес - это совокупный вес клиента и максимальная сила давления рук терапевта.

Максимальный рабочий вес стола составляет кг. Так, для клиента весом 135 кг максимальное давление вниз, которое можно безопасно применить, составляет 90 кг. Поскольку давление, оказываемое под углом, создает значительно большую нагрузку на стол, максимальное боковое давление не должно превышать 50% от максимального давления, направленного вертикально вниз.

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ВЕС. (Это может привести к серьезным травмам и/или повреждениям изделия).

Хранение:

Прикрепите основание подголовника илицевую подушку к эластичной подложке под столом, как показано на рисунке. Установите каждый аксессуар в исходное положение. (Рисунок 6).



Рисунок 6

При транспортировке и хранении стола следует использовать чехол, чтобы защитить его от повреждений. Когда стол не используется, храните его в прохладном, сухом месте и вдали от прямых солнечных лучей. Не подвергайте

стол воздействию экстремальных (горячих или холодных) температур, а также влаги.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Уход за обивкой

Ежедневная чистка: Ежедневно удаляйте грязь и загрязнения со стола с помощью мягкого чистящего средства и теплой воды. Вытирайте насухо мягкой тканью без ворса.

Дезинфекция: Дезинфицируйте стол по мере необходимости с помощью дезинфицирующего средства для больниц на основе изопропанола (разрешенного для использования на полиуретановом виниле).

Дезинфицируйте стол по мере необходимости с помощью дезинфицирующего средства для больниц на основе изопропанола (разрешенного для использования на полиуретановом виниле).

Удаление пятен: Незначительные пятна можно удалить с помощью мягкого неабразивного чистящего средства.

Нанесите средство на влажную ткань и аккуратно протрите, чтобы удалить пятно, затем тщательно промойте теплой водой и вытрите насухо мягкой безворсовой тканью. Для удаления более стойких пятен может потребоваться профессиональная чистка.

Уход за деревом:

Ваш массажный стол изготовлен из твердых пород дерева и покрыт лаком, который не требует ухода. При желании вы можете полировать его специальным средством для ухода за деревом.

Инструкция по установке подголовника



1) Проденьте сторону подголовника в петлю подставки для рук



2) Вставьте стержни в отверстия в верхней части стола и зафиксируйте их с помощью рычага-фиксатора



3) Поверните рычаг подставки для рук через центральную часть подголовника



4) Зафиксируйте высоту подставки для рук с помощью пинки



5) Регулируем длину лопатки, выравниваем положение подставки для рук



6) Зафиксируйте подставку для подголовника с помощью фиксатора-рычажка

Использование регулируемого подголовника

1. Вставьте стержни в отверстия на массажном столе

2. Поверните рычаг так, чтобы он занял горизонтальное положение выступами вверх



Рисунок 1



Рисунок 2

3. Настройте положение подголовника по своему желанию, после чего верните рычаг в исходное положение

1



2



3



4



5



6



Храните стол в сухом месте и избегайте воздействия влажной или сырой среды. Если стол намок, быстро и тщательно протрите его насухо мягкой тканью.

3-секционный массажный стол

Регулировка высоты спинки:

Отсоединив пряжку, вы можете приподнять поддерживающую планку спинки. Отрегулируйте ее до желаемого положения (Рисунок 7).



Рисунок 7

После того как вы установили оптимальную высоту спинки, застегните пряжку обратно (Рисунок 8).



Рисунок 8

Гарантийное обслуживание

Мы гарантируем, что продукт является новым и не имеет дефектов производства.

Гарантия распространяется на ножки стола, боковые подлокотники, полку для рук, подголовник и остальные дополнительные аксессуары.

Данная гарантия является действительной в течение 2 лет с даты покупки и распространяется только на оригинальную продукцию.

Гарантия не распространяется на виниловое покрытие, поролоновые прокладки, любые затраты на установку запасных частей или убытки, связанные с невозможностью использования стола.

Гарантия распространяется на использование массажного стола в стандартном виде. Любая модификация изделия аннулирует гарантию в полном объеме.

Клиент несет ответственность за все расходы по транспортировке документации и изделия в рамках гарантийного обслуживания.

Запасные части будут высылаться по мере возможности.

Ответственность

Данный продукт предназначен использования взрослыми людьми старше 18 лет.

Производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или травмы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия, включая любые неисправности, вызванные небрежностью или дефектами.

Покупатель освобождает производителя, его агентов и филиалы от любой ответственности, возникающей в результате или в связи с использованием или владением данным изделием.

Покупатель полностью принимает на себя ответственность и освобождает продавца от ответственности за любые травмы, несчастные случаи со смертельным исходом, а также любые убытки, расходы и ущерб, понесенные в результате эксплуатации данного изделия покупателем или кем-либо еще. Приобретая этот товар, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и согласны с условиями настоящего Соглашения, а также заявляете, что вы достигли совершеннолетия (18+), чтобы заключить настоящее Соглашение.

**Расслабляйтесь
вместе с *UNIX***